



## Swedish Hospital Supply AB

### Preguntas y respuestas acerca del dispositivo respiratorio BA-TUBE:

- Pregunta:** He comprado un BA-TUBE en mi farmacia. En el prospecto del paquete hay dos instrucciones de uso diferentes. ¿Cuáles debo seguir?
- Respuesta:** Si vas a exhalar por el BA-TUBE, sigue las instrucciones que no tienen un horario semanal impreso, porque las que se encuentran en esa página sirven para fortalecer la inhalación.
- Pregunta:** ¿Para qué sirve el pistón negro, que parece un clavo, que incluye el paquete?
- Respuesta:** Al desmontar el BA-TUBE para limpiarlo, insértalo en el tubo y separa las piezas con ayuda del pistón. No tiene otra función.
- Pregunta:** Utilizo mi BA-TUBE de forma privada en casa. ¿Con qué frecuencia debo limpiarlo y cómo?
- Respuesta:** Si no estás resfriado ni padeces ninguna otra infección respiratoria, nuestra sugerencia es que, después de un día de uso, desmontes el BA-TUBE y lo enjuagues bajo el grifo de agua caliente, y luego dejes que se seque al aire. Dos o tres veces por semana, hierva en agua las partes desmontadas durante aproximadamente medio minuto. A continuación recógelas con una espumadera y déjalas secar al aire. Al montar el BA-TUBE, asegúrate de que la flecha de instrucciones de la parte superior azul apunte a la escala numérica del tubo. Luego junta y presiona las piezas hasta que hagan «clic». De lo contrario, si no estás seguro, consulta con tu enfermero o fisioterapeuta de EPOC.
- Pregunta:** En nuestro departamento utilizamos regularmente BA-TUBE con nuestros pacientes. Cuando el paciente vuelve a casa, le recomendamos que compre un BA-TUBE en su farmacia. ¿Cuál es la mejor manera de limpiar el BA-TUBE para poder dárselo al próximo paciente hospitalizado?
- Respuesta:** Desmonta el BA-TUBE y coloca las piezas en la rejilla de tu descontaminador. Procésalo como de costumbre a temperaturas de hasta 100 °C y luego deja que las piezas se sequen al aire antes de montarlo de nuevo.
- Pregunta:** Tengo 75 años y he comprado un BA-TUBE. Sigo las instrucciones de uso para la exhalación, tal como me han recomendado en mi Centro de Salud. Después de soplar en el tubo durante unos minutos, se me cansan mucho los labios y me cuesta cerrarlos en torno al tubo. ¿Qué hago?
- Respuesta:** La parte del BA-TUBE que se inserta en la boca tiene un hueco. Coloca los dientes en este hueco y sujeta con ellos el tubo, así no te cansarás tanto y podrás entrenar durante periodos mucho más largos.