



Swedish Hospital Supply AB

Fragen und Antworten P-BAG

- Frage:** Wir haben P-BAG für unsere Abteilung gekauft. Wenn wir den Karton öffnen, sehen wir, dass er lose Beutel und Trichter enthält. Wie stellen wir sicher, dass das Produkt leakagefrei ist, wenn wir den Trichter an den Beutel anschließen?
- Antwort:** Drücken Sie den Trichter in den Sockel des Beutels, bis Sie ein Klicken hören, was bedeutet, dass der Trichter korrekt mit dem P-BAG verbunden ist.
- Frage:** Nachdem wir den Trichter mit dem Beutel verbunden haben, in welche Richtung sollte der Trichter bei Verwendung gerichtet werden?
- Antwort:** Der Griff des Trichters sollte zur Oberseite des Beutels gerichtet sein.
- Frage:** Können unsere Patientinnen den P-BAG verwenden?
- Antwort:** Ja, der P-BAG ist Unisex und kann von Frauen sowohl im Liegen als auch im Sitzen und Stehen genutzt werden. Die Patientin hält den Griff, und der untere/ gegenüberliegende Teil des Trichters schließt während des Gebrauchs dicht, aber nicht hart zwischen dem Anus und der Vagina an.
- Frage:** Wir haben in unserer Abteilung einen Karton P-BAG mit 10 Trichtern und 100 Beuteln erhalten. Sollen wir den Trichter für mehr als einen Beutel verwenden? Wie reinigen wir in diesem Fall den Trichter, kann dies in unserem Dekontaminator erfolgen?
- Antwort:** Wenn der Beutel mit Urin gefüllt ist, greifen Sie nach dem Griff des Trichters und schütteln den Beutel leicht, damit alle verbleibenden Tropfen zwischen Trichter und Beutel in den Beutel gelangen. Reißen Sie dann den Beutel in der Beutelmarkierung oben auf dem Beutel auf, fassen Sie den Griff des Trichters und den unteren Teil des Beutels und gießen Sie den Inhalt aus. Drehen Sie dann den Trichter aus dem Beutel heraus und erhitzen Sie ihn gemäß Ihren Routinen in Ihrem Dekontaminator bis zu 100 °C. Der Trichter kann dann wiederverwendet und an einen neuen Beutel angeschlossen werden.
- Frage:** Wir haben festgestellt, dass vor dem Gebrauch Luft in den Beutel gelangen kann und dass dies in einigen Fällen verhindert, dass Urin in den Beutel gelangt. Wie können wir das beheben?
- Antwort:** Der Beutel ist mit einem Rücklaufventil ausgestattet, um Leckagen und schlechten Geruch zu vermeiden. Sie entfernen einfach die Luft im Beutel, indem Sie den Beutel auf eine feste Oberfläche legen und einen Stift oder ähnliches in das Loch im Boden des Trichters einführen, den Beutel mit der Hand drücken und dadurch die Luft im Beutel evakuieren.
- Frage:** Können wir die geleerten Beutel ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt in der Kesselanlage des Krankenhauses verbrennen?
- Antwort:** Ja, das ist ohne weiteres möglich. Der P-BAG besteht aus dem umweltfreundlichen Material Polyethylen, das bei der Verbrennung etwa 85-90 % Sauerstoff und 10-15 % Kohlendioxid in Form von Rauchgasen abgibt. 5 kg verbranntes P-BAG entsprechen dem Energiewert von 9 kg Öl bei Verbrennung.