



## Swedish Hospital Supply AB

### Fragen und Antworten P-BAG SAP

- Frage:** In der häuslichen Krankenpflege unserer Gemeinde setzen wir seit einiger Zeit regelmäßig den P-BAG SAP ein, der Superabsorbens enthält. Wie stellen wir sicher, dass das Produkt leakagefrei ist, wenn wir den Trichter an den Beutel anschließen?
- Antwort:** Drücken Sie den Trichter in den Sockel des Beutels, bis Sie ein Klicken hören, was bedeutet, dass der Trichter korrekt mit dem P-BAG SAP verbunden ist.
- Frage:** Nachdem wir den Trichter mit dem Beutel verbunden haben, in welche Richtung sollte der Trichter bei Verwendung gerichtet werden?
- Antwort:** Der Griff des Trichters sollte zur Oberseite des Beutels gerichtet sein.
- Frage:** Können unsere Patientinnen den P-BAG SAP verwenden?
- Antwort:** Ja, der P-BAG SAP ist Unisex und kann von Frauen und Männern sowohl im Liegen als auch im Sitzen und Stehen genutzt werden. Die Patientin hält den Griff, und der untere/ gegenüberliegende Teil des Trichters schließt während des Gebrauchs dicht, aber nicht hart zwischen dem Anus und der Vagina an.
- Frage:** Es ist uns weitgehend gelungen, Windeln für Erwachsene für unsere Benutzer zu ersetzen, indem wir ihnen stattdessen P-BAG SAP zur Verfügung stellen. Dies hat zu einer deutlich verbesserten Lebensqualität und Integrität dieser Benutzer geführt, während unsere Gemeinde Geld spart, da die Verwendung von Windeln pro Tag und Benutzer erheblich kostenaufwendiger ist. Nun aber zu unserer Frage: Wie wird der P-BAG SAP am besten entsorgt?
- Antwort:** Der P-BAG SAP enthält Superabsorbens, d. h. auch wenn der Beutel gefüllt ist, hat ist das Superabsorbens immer noch wirksam. Dies bedeutet, dass der Inhalt des Beutels nicht in die Toilette oder ähnliche Behälter entleert werden darf. Sie müssen den Beutel gemäß den Routinen entsorgen, die bei Ihnen für die Entsorgung von Windeln gelten. Der Unterschied zwischen der Entsorgung von Windeln und dem P-BAG SAP besteht darin, dass der Inhalt des Beutels versiegelt und somit geruchlos ist, weil der Beutel über ein Rücklaufventil verfügt. Daher kann er zusammen mit dem üblichen Hausmüll entsorgt werden.
- Frage:** Wir haben festgestellt, dass vor dem Gebrauch Luft in den Beutel gelangen kann und dass dies in einigen Fällen verhindert, dass Urin in den Beutel gelangt. Wie können wir das beheben?
- Antwort:** Der Beutel ist mit einem Rücklaufventil ausgestattet, um Leckagen und schlechten Geruch zu vermeiden. Sie entfernen einfach die Luft im Beutel, indem Sie den Beutel auf eine feste Oberfläche legen und einen Stift oder ähnliches in das Loch im Boden des Trichters einführen, den Beutel mit der Hand drücken und dadurch die Luft im Beutel evakuieren.