



Swedish Hospital Supply AB

Preguntas y respuestas acerca de la bolsa colectora de orina P-BAG SAP;

- Pregunta:** En la atención sanitaria domiciliaria, llevamos algún tiempo utilizando en nuestro municipio la P-BAG SAP de forma habitual, que contiene material superabsorbente. ¿Cómo asegurarnos de que no se produzcan fugas cuando conectamos el embudo a la bolsa?
- Respuesta:** Presione el embudo contra el zócalo de conexión de la bolsa hasta escuchar un "clic", que significa que el embudo está correctamente conectado a la P-BAG SAP.
- Pregunta:** Una vez hemos conectado el embudo a la bolsa, ¿en qué dirección debe orientarse el embudo para utilizarlo?
- Respuesta:** El asa del embudo debe orientarse hacia la parte superior de la bolsa.
- Pregunta:** ¿Pueden nuestras pacientes usar también la P-BAG SAP?
- Respuesta:** Sí, la P-BAG SAP es unisex y resulta de gran utilidad tanto para mujeres como para hombres, ya se encuentren acostados, sentados o de pie. Durante su uso, la paciente ha de sostener firmemente, pero sin llegar a hacerse daño, el asa y la parte inferior/opuesta del embudo en el espacio que se encuentra entre el ano y la vagina .
- Pregunta:** Hemos conseguido reemplazar en gran medida los llamados «pañales para adultos», facilitando a nuestros usuarios y usuarias bolsas P-BAG SAP en su lugar. Esto ha mejorado significativamente su calidad de vida y su integridad, y supuesto a la vez un ahorro a nuestro municipio, ya que el uso de pañales conlleva un gasto por día y usuario significativamente mayor. Ahora, la pregunta: ¿cuál es la mejor manera de eliminar la P-BAG SAP?
- Respuesta:** La P-BAG SAP contiene material superabsorbente, que actúa eficazmente incluso si la bolsa está llena. Esto significa que el contenido de la bolsa no debe vaciarse en el inodoro o similares. Debes eliminar la bolsa de acuerdo con los protocolos establecidos para la eliminación de pañales. La diferencia entre la eliminación de pañales y de la P-BAG SAP consiste en que, gracias a que cuenta con una válvula de retención, el contenido de la bolsa está sellado y es inodoro, lo que significa que se puede tirar a la basura doméstica habitual.
- Pregunta:** Hemos notado que el aire puede entrar en la bolsa antes de su uso y que en algunos casos esto evita que la orina entre en la bolsa. ¿Cómo podemos solucionarlo?
- Respuesta:** La bolsa viene equipada con una válvula de retención para evitar fugas y malos olores. No tienes más que eliminar el aire de la bolsa colocándola sobre una superficie sólida e insertando un bolígrafo o similar en el orificio que hay en el fondo del embudo, y presionando la bolsa con la mano para así evacuar el aire de la bolsa.