



Swedish Hospital Supply AB

Preguntas y respuestas acerca de la bolsa colectora de orina P-BAG;

- Pregunta:** Hemos adquirido la P-BAG para nuestro departamento. Al abrir la caja hemos comprobado que contiene bolsas y embudos sueltos. ¿Cómo asegurarnos de que no se produzcan fugas cuando conectamos el embudo a la bolsa?
- Respuesta:** Presione el embudo contra el zócalo de conexión de la bolsa hasta escuchar un "clic", que significa que el embudo está correctamente conectado a la P-BAG.
- Pregunta:** Una vez hemos conectado el embudo a la bolsa, ¿en qué dirección debe orientarse el embudo para utilizarlo?
- Respuesta:** El asa del embudo debe orientarse hacia la parte superior de la bolsa.
- Pregunta:** ¿Pueden también nuestras pacientes utilizar la P-BAG?
- Respuesta:** Sí, la P-BAG es unisex y resulta de gran utilidad para las mujeres, ya se encuentren acostadas, sentadas o de pie. Durante su uso, la paciente ha de sostener firmemente, pero sin llegar a hacerse daño, el asa y la parte inferior/opuesta del embudo en el espacio que se encuentra entre el ano y la vagina .
- Pregunta:** Hemos recibido una caja de P-BAG en nuestro departamento que contiene 10 embudos y 100 bolsas. ¿Hemos de utilizar el embudo para más es una bolsa? En ese caso, ¿cómo lo hemos de higienizar? ¿Lo podemos tratar en nuestro descontaminador?
- Respuesta:** Una vez la bolsa esté llena de orina, tome el asa del embudo y agite la bolsa con suavidad para que las gotas que pudieran haber quedado entre el embudo y la bolsa caigan a ella. A continuación abra la bolsa por su marca superior y, tomando el asa del embudo y la parte inferior de la bolsa, vierta el contenido.
Después gire y separe el embudo de la bolsa e introdúzcalo en su descontaminador a cien grados centígrados (100 °C), de acuerdo con sus protocolos. Después podrá conectar/utilizar el embudo a/con una nueva bolsa.
- Pregunta:** Hemos notado que el aire puede entrar en la bolsa antes de su uso y que en algunos casos esto evita que la orina entre en la bolsa. ¿Cómo podemos solucionarlo?
- Respuesta:** La bolsa viene equipada con una válvula de retención para evitar fugas y malos olores. No tienes más que eliminar el aire de la bolsa colocándola sobre una superficie sólida e insertando un bolígrafo o similar en el orificio que hay en el fondo del embudo, y presionando la bolsa con la mano para así evacuar el aire de la bolsa.
- Pregunta:** ¿Podemos incinerar nuestras bolsas vacías en las calderas del hospital sin causar un impacto ambiental negativo?
- Respuesta:** Sí, es un buen sistema. De hecho, la P-BAG está confeccionada con PE Polietileno ecológico, que durante la combustión emite alrededor de un 85-90% de oxígeno y 10-15% de dióxido de carbono en forma de gases de combustión.
La combustión de 5 Kg de bolsas P-BAG proporciona la misma energía que 9 Kg de petróleo.