



Mera

Medical Solutions S.L.

MERA MEDICAL SOLUTIONS, S.L

Troya street 18, Pavilion 6-A5

20.115 Astigarraga – Guipúzcoa (Spain)

☎: (+34) 943 291 918

info@meramedicalsolutions.com

www.meramedicalsolutions.com

Produktdatablad

Referens:	harex
Märke:	harex®
Tillverkare:	MERA MEDICAL SOLUTIONS, S.L.
Beteckning:	Medicintekniskt hjälpmedel för kontroll av manlig urininkontinens

Beskrivning

HAREX® är en icke-steril klass I-medicinskt hjälpmedel. Den placeras precis under ollon-penis och genom att applicera tryck på urinröret förhindrar och stoppar den ofrivillig urinläckage hos män. Den är liten, bekväm och fullt justerbar. Den är gjord av tvättbara material och viktigast av allt, den förbättrar livskvaliteten och låter dig återgå till det normala vardagslivet.

Material som används

HAREX-enheten® är tillverkad av högkvalitativa, lätta sanitetsplaster som POM, ABS, TPE och polypropen, tekniskt testade för att vara vätskeabsorberande och latexfri för att undvika allergiska reaktioner.

Essential Benefits

1. **Bekväm:** Den är utformad så att den kan användas i flera timmar åt gången.
2. **Hållbar och pålitlig:** tillverkad av högkvalitativa material som garanterar perfekt funktion.
3. **Lätt att använda:** designad för att användas utan någon hjälp
4. **Hygieniskt:** håller könsområdet torrt och förhindrar lukt och infektioner.
5. **Lätt att rengöra:** rengör med varmt vatten och tvål.
6. **Tillåter blodcirkulation:** sätter inget tryck på sidorna av penis och kan därför användas i flera timmar åt gången.

Mått

Stor: 50 mm. +1/-1

Tjock: 18 mm. +1/-1

Bredd: 50 mm. +1/-1

Vikt: cirka 18 g.



HAREX®

Medical Device for Male Urinary Incontinence Control

www.harex.net



Mera

Medical Solutions S.L.

MERA MEDICAL SOLUTIONS, S.L

Troya street 18, Pavilion 6-A5

20.115 Astigarraga – Guipúzcoa (Spain)

☎: (+34) 943 291 918


info@meramedicalsolutions.com

www.meramedicalsolutions.com

Instruktion

DEVICE PLACEMENT

PLACERING AV ANORDNINGEN

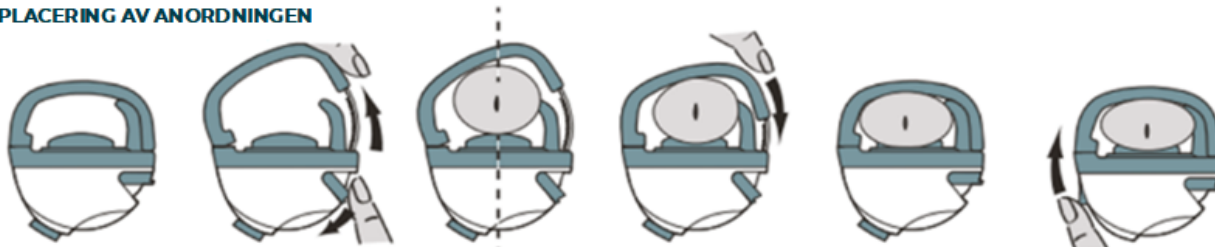

Initial setup.


- 1 Move the lever down. Loosen the belt.
- 2 Introduce the penis into the Device.
- 3 Adjust the belt to the contour of the penis.
- 4 Move the lever up to fix the strap.
- 5 Move the pressure activator up.

Initial inställning.

- 1 Skjut spaken nedåt. Lossa remmen.
- 2 För in penis i anordningen.
- 3 Justera remmen efter penisens omkrets.
- 4 Skjut spaken uppåt för att fästa remmen.
- 5 Skjut tryckreglaget uppåt.

DEVICE REMOVAL

AVLÄGSNANDE AV ANORDNINGEN

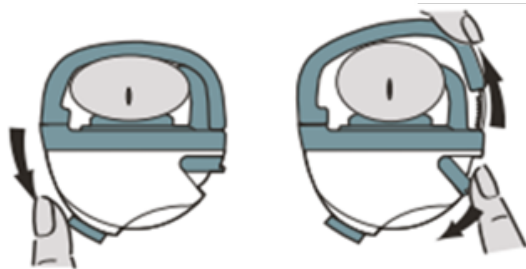


- 6 Move the pressure activator down.

Skjut ned tryckreglaget.

- 7 Release the adjustment lever and loosen the belt; remove the penis from the Device.

Släpp justeringsspaken och lossa remmen; ta bort penis från anordningen.

TO URINATE FÖR URINERING

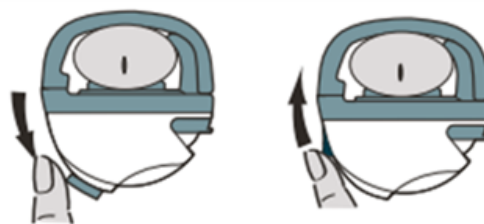

- 8 Move the pressure activator down.

Skjut ned tryckreglaget.

- 9 Once finish, move the pressure activator to the initial position.

När du är klar, skjut tillbaka tryckknappen till utgångsläget.

Fig. 1



HAREX[®]

Medical Device for Male Urinary Incontinence Control

www.harex.net

Användbara tips

Om det inte finns något naturligt behov av att tömma blåsan är det rekommenderat att släppa på apparaten var 2:e till 3:e timme för att undvika överfyllning av urinbåsan.

Placering av urinrörsdyna: När du placerar enheten, se till att tryckplattan är i rätt position för att klämma på urinröret och inte är förskjuten så att urinröret är helt blockerat för att förhindra urinläckage.

Presentation

Innehåll: 1 harex-enhet®
 1 Transport-ask/etui
 1 Bruksanvisningar

EAN-kod: 8437019807009



HAREX®

Medical Device for Male Urinary Incontinence Control
www.harex.net